



フェムテックプロジェクト

女性の社会進出がますます重要視される近年、女性が最大限のパフォーマンスを発揮できるように、社会全体で女性のための環境について考える時代になりました。プロラボ ホールディングスでは、「すべての女性の不安を解消したい」と願うたくさんの女性社員の声から、「FEMTECH PROJECTS」が立ち上がりました。



フェムクリアはこんな方におすすめです

- 清潔に保ちたい
- 不快感が気になる
- おりものが気になる
- どんなケアをすべきかわからない
- スッキリしない
- 膣ケアをはじめたい

フェムクリアご使用方法 衛生的にスムーズに挿入できる簡単ワンプッシュ設計。ジェルは自然と排出されますのでナプキンやおもものシートのご使用がおすすめです。



1 個別包装の上端を切り取り線に沿って開きます。

2 袋内でキャップを指で折るようにして外し、個別包装から本体を引き抜きます。

3 楽な姿勢で、アプリーターの先端から5~8cmを腔に挿入します。

4 ピストンをゆっくりと押し、洗浄液を注入します。

5 本体をゆっくりと取り出します。


Fem Clear フェムクリア 管理医療機器 腔洗浄器

価格:2,800円(税込3,080円) 内容量:1.7g(標準)×5本入り

●一般的な名称:腔洗浄器●原材料名:精製水(主剤)、ヒドロキシエチルセルロース、乳酸、クエン酸ナトリウム、安息香酸ナトリウム、硼酸Na、エド酸ナトリウム、グリオキサル、ヒアルロン酸ナトリウム、フェノキシエタノール、オクトキシグリセリン●保存方法:直射日光・高温・多湿を避け保存してください。

グリセリンフリー | パラベンフリー | ヒアルロン酸ナトリウム^{*}配合 | 弱酸性乳酸^{*}配合

【ご注意】○本品は、1回1本単回使用タイプの腔洗浄器です。○1日1本、週に3~4回程度を目安に使用してください。○妊娠中や局部に炎症等異常のある場合は、使用前に医師にご相談ください。○避妊効果はありません。避妊フィルムなどの殺精子剤を使用した後にお使いになると、避妊効果がなくなることがありますので本品の使用をお止めください。○使用中に万一異常を感じた場合には、使用を中止し医師にご相談ください。使用後も症状が続く場合は医師にご相談ください。○使用期限の過ぎた商品は使用しないでください。

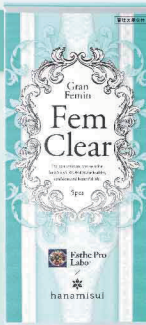

管理医療機器認証番号:第225AFBZX00021A04号 *1:感触改良成分 *2:pH調整剤

【販売元】株式会社プロラボ ホールディングス
〒108-0073 東京都港区三田3-7-18
URL: <https://granfemin.com>
【製品に関するお問い合わせ】

☎0120-911-854
Produced by



Fem Clear
公式サイトはこちら



■お申し込み・お問い合わせは



Gran Femin Fem Clear

The best intimate care solution
for EVERY WOMEN, for healthy,
confident, and beautiful life.

管理医療機器 腔洗浄器

腔内環境をクリアに導き、女性を内側から
サポートするデリケートケアの新定番。

フェムクリア Fem Clear



デリケートな こころとカラダに寄り添い 全ての女性を前向きに。

現代の女性のライフステージの移り変わりや日々のバランスに向き合い、自分らしく心地よく過ごすために。
フェムクリアは、腔内環境に着目した管理医療機器「腔洗浄器」。カラダへの負担に配慮し、腔内でもやさしくお使いいただけるような成分を厳選。こまめな使用により、カラダにやさしい弱酸性ジェルで腔内を清潔な状態に保ちます。フェムクリアで、前向きなこころとカラダへ。

女性の健康にとって 「正しい腔ケア」が大切な理由とは。

多くの女性が腔内の正しいケアを知らないという事実。

デリケートゾーンの汚れや不快感等の大きな原因は、実は腔内環境の乱れによるもの。しかし、実際に腔ケアをしていない女性も多いのが現状です。



※調査方法: インターネット調査、調査人数: 1,042人、モニター提供先: セネナリサーチ



Q.
デリケートゾーンの特別なケアはしていますか?*

間違った腔ケアは、トラブルの悪循環に。

デリケートゾーンは、他の部位よりも繊細なのでゴシゴシ洗いは禁物。とはいえ汚れはしっかりケアしないと、汚れや不快感などのトラブルにつながってしまいます。

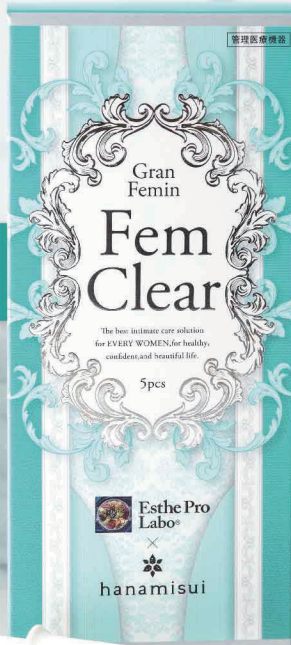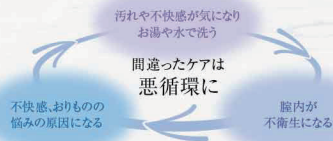

管理医療機器 腔洗浄器

管理医療機器 認証番号: 第225AFBZX00021A04号

デリケートゾーンのNGケアに要注意

- ゴシゴシ強く洗う
- 何度もこまめに洗う
- 腔の奥まで洗う

フェムクリアは、 内側から女性をサポートする 管理医療機器「腔洗浄器」です。

内側から腔内をスッキリ洗浄するフェムクリア。
デリケートゾーンケアを新習慣に。

エチケット
ケア

衛生的で簡単に使えるアプリーケータ

おりもの
ケア



フェム クリア の特徴

内側から腔内環境をケアするための
4つの特徴

1 低浸透圧

腔内への刺激を抑えます。
腔内への刺激を最小限に抑えるため、
中身のジェルの浸透圧の低下を実現
しました。

2 弱酸性

腔内のpH値に
合わせた弱酸性。
腔内に配慮した設計に
こだわりました。



3 乳酸*

体へのやさしさを追求。
体によさしい乳酸を配合。腔内環境にも配慮
した成分です。*pH調整剤として

4 ヒアルロン酸ナトリウム*

優しい使い心地。
ヒアルロン酸ナトリウムを多く配合することに
よって、なめらかな使い心地に。*感触改良成分

